


Bare et rent sår vil tilhele!

For skånsom og effektiv sårbunnsopptimalisering.

Debrisoft® Pad gir deg muligheten til å debridere et sår uten bruk av skarpe instrumenter! Med paden får du effektivt bort både fibrin, eksudat og biofilm fra sårbunnen hvilket bidrar til å fremme sårtilhelingen.



fibre technology
ACTITOP

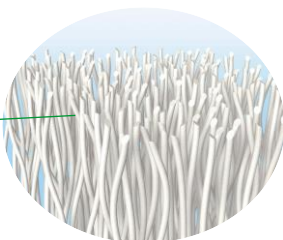

Mange fordeler!

Debrisoft® Pad består av monofilamente polyesterfibrer med en unik Actitop-teknologi. De kanyleformede fibre løfter og fjerner effektivt eksudat og døde cellerester fra sårbunnen. Baksiden av paden har en komfortabel lomme for bedre grep og håndtering.

Raskt resultat



- Sparer tid og derfor penger
- Gjør såret rent på **2-4** minutter
- Effektiv mot biofilm

Enkel å bruke




- Debrideringspaden er praktisk og brukervennlig.
- 95% vurderer den som veldig bra eller utmerket!

Nesten smertefritt




- Bedre etterlevelse
- Lite smerter

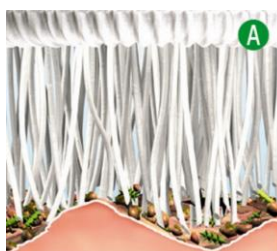

Indikasjoner (A)

- Trykksår
- Leggsår
- Diabetiske fotsår
- Brannskader

Kan også brukes ved hudlidelser som f.eks. psoriasis hyperkeratose og akne.

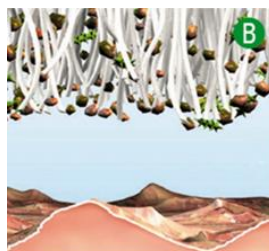

Funksjon (B)

De patenterte fibertrådene binder til seg fibrin, eksudat og bakterier slik at det blir en skånsom og effektiv opprensing av såret.



Bruksanvisning

- Fukt debrideringspaden med vanlig springvann eller NaCl 0,9 % i samsvar med gjeldene lokale retningslinjer (kan også fuktes med annen sårskyllevæske om ønskelig), ca 20-40 ml. Overskuddsvæske ristes bort.
- Bruk den forfuktede myke fibersiden ned mot såret. Debrider såret vha bevegelser med et lett trykk mot sårflaten.
- Ved behov kan en ny debrideringspad brukes for å rengjøre huden rundt såret.
- Etter debrideringen kan såret behandles etter gjeldende prosedyre.

Forsiktighetsregler

- La ikke Debrisoft® Pad bli igjen på såret etter bruk, det er ingen bandasje.
- Debrideringspaden er til engangs bruk.
- Skal ikke benyttes etter at såret har blitt friskt rødt og er velvaskulert.
- Debrisoft® Pad skal ikke klippes i.
- Debrisoft® Pad skal ikke brukes til pasienter som har kjent allergi mot produktes materiale.



Debrisoft® Pad finnes i to størrelser:

Størrelser	Lev.art.nr.	Avd.fp	Trp.fp
10x10 cm	34 321	5	50
13x20	34 323	5	50

Produktmateriale

- Fibersiden består av monofilamente polyesterfibrer.
- Innsiden og baksiden består av polyakrylat.
- Lateksfri
- Produktet er pakket separat og er EO-sterilisert.

Debrisoft® Pad

- CE-merket
- Oppbevares tørt og rent i romtemperatur.
- Holdbar i 5 år fra produksjonsdato.
- Produktemballasje av cellulose, polyester og polypropylen.
- Lageremballasje og bruksanvisning av cellulose som kan kildesorteres.
- Transportemballasje i wellpapp/bølgepapp av cellulose. Kan kildesorteres.
- Produktet behandles som brennbart avfall.