



People.Health.Care.

Suprasorb® CNP EasyDress Fixateur Externe

Raskere fiksering ved undertrykksbehandling av sår!

Suprasorb® CNP Easy Dress Fixateur Externe brukes som sekundærbandasje til forsegling av sår på ekstremiteter behandlet med ekstern fiksasjon og vakumbehandling.

Den består av en tubeformet bandasje som er åpen i den bredeste enden, laget av vandampgjennomtrengelig polyuretanfilm. Fikses med filmstriper for å oppnå en luft-tett applisering.



Mange fordeler!

- Kan benyttes sammen med alle typer pumper.
- Raskere applisering.
- Pakket sterilt.
- Fleksibelt materiale.
- Hudvennlig fordi det er et ikke-klebende materiale.
- Høy fordampningsevne.

Raskt applisering



- Raskere sårskift enn tradisjonell fiksering.
- Kostnadseffektiv.

Enkel å bruke



- Enkel og trygg
- Sikrer raskt negativt trykk på vanskelige steder.
- Kan klippes i for bedre tilpassing.

Pasientvennlig




- Høy fordampningsevne hindrer maserasjon av huden under.
- Hudvennlig.
- Fornøyde pasienter

Indikasjoner:

- Sekundærbandasje til bruk ved undertrykksbehandling av sår som blir behandlet med ekstern fiksasjon og undertrykk (CNP/VAC/NPWT).


EasyDress

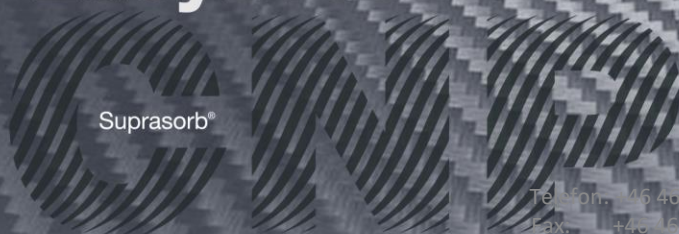

Suprasorb®

Lohmann & Rausher AB
 Telefon: +46 40 24 80 00
 Fax: +46 40 24 80 01
 Grönegatan 1 C, SE-222 24 Lund
 E-post: info@se.lrmed.com
 www.lohmann-rauscher.se

Leverandør i Norge:
 CODAN NORGE AS
 Ask 22, 2022 Gjerdrum
 Telefon: +47 99310000
 E-post: codan@codan.no

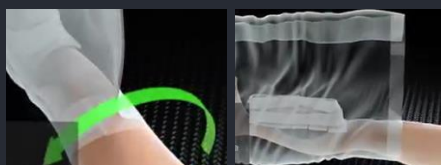

Bruksanvisning

- Såret renses/debrideres og vakumskiftet utføres etter gjeldende prosedyrer. Svamp eller gauze benyttes i såret. Huden rundt såret skal være tørr og ren.
- Tilpass EasyDress bandasjen. det bør være minst 12 cm fra den kroppsnære enden av den eksterne fiksasjonen til den åpne enden av EasyDress bandasjen.
- Negler bør klippes korte og mellomrom mellom tær og fingre kan eventuelt "polstres" med Kerlix eller Sorbact.
- Tildekk huden rundt inngangstedene og langs den eksterne fiksasjonen, benytt gauze som er egnet til sårbehandling med undertrykk (eks Kerlix eller Sorbact) alternativt kan sårkontaktlag benyttes. Klipping av sårkontaktlaget med steril saks gjør det mulig å legge bandasjen nøyaktig og uten folder rundt inngangstedene.
- Fyll opp mellomrommene på stagene med sort PU-sårskum og beskytt de skarpe kantene på den eksterne fiksasjonen og pinneendene som stikker ut med enten steril antimikrobiell kompress (Kerlix) eller et annet sterilt fikseringsbind.
- Tubebandasjen trekkes deretter på ekstremiteten som er i funksjonell stilling.
- Hold den tubeformede bandasjen opp i den åpne enden, med hjelp fra en annen person, til det underliggende området ligger glatt inntil pasienten.
- Start med å fikser avslutningskanten i den åpne enden med de medfølgende fikseringsfilmene. Fikseringsfilmene må ikke strekkes under appliseringen da det kan redusere blodforsyningen. Trekk deretter den åpne enden stram og lim sammen de to avslutningskantene. Fold deretter filmen og fikser den med fikseringsfilm tett ned mot huden.
- Klipp hull til porten og koble til pumpen.
- Anbefalt innstilt undertrykk på mellom -80 og -125 mmHg.
- På grunn av det store volumet i EasyDress Fixateur Externe vil man få feilmeldinger på pumpen som må "kvitteres ut" 3-4 ganger før man oppnår ønsket undertrykk.
- Må byttes ved hvert sårskift.

Suprasorb® CNP EasyDress Fixateur Externe

Lev. Art.nr	Størrelse	Omkrets (cm)	Lengde (cm)	Fiksering strimler, antall (10x25 cm)	Avd.fp	Trp.fp
LR34905	One Size	150	120	6	5	30

Produktmateriale

- Polyuretanfilm som er gjennomtrengelig for vanddamp, men luft- og bakterietett. Gjennomsiktig.
- Fikseringsfilmer/strips av polyuretan påført klebemiddel av polyakrylat.
- Lateks-fri.

Suprasorb® CNP EasyDress

- CE-merket i henhold til MDR klasse 1.
- Oppbevares tørt og rent i romtemperatur.
- Holdbar i 3 år fra produksjonsdato.
- Produktemballasje av cellulose, polyamide og polyethylene.
- Lageremballasje og bruksanvisning av cellulose som kan kildesorteres.
- Transportemballasje i wellpapp/bølgepapp av cellulose. Kan kildesorteres.
- Produktet behandles som brennbart avfall i henhold til lokale og nasjonale forskrifter.

EasyDress

Suprasorb®

Lohmann & Rauscher AB
Grönegatan 1 C, SE-222 24 Lund
E-post: info@se.lrmed.com
www.lohmann-rauscher.se

Telefon: +46 46 32 81 00
Fax: +46 46 32 81 20

Leverandør i Norge:
CODAN NORGE AS
Ask 22, 2022 Gjerdrum
Telefon: +47 99310000
E-post: codan@codan.no