

Debrisoft Duo - To sider - En løsning!



Debrisoft®-familien består nå av den vanlige Debrisoft® Pad, Debrisoft® Lolly og Debrisoft® Duo

Debrisoft® Duo – Forbedrer originalen



Tosidig pad (10 x 10 och 13 x 20)

Nye strukturerte fibre på den ene siden av lommen.

Ny farge på fibre: beige

Ny fiber struktur: løkker

Den originale Debrisoft® Pad med monofilamente fibre på den andre siden


- Den teksturete beige siden gjør det lettere å løsne hardt fibrinøst vev fra sårbunnen.
- Den myke hvite siden fjerner og absorberer debridement og keratoser m.m

Debrisoft® Duo's to ulike fiber gir mer fleksibilitet



Løkker: løsner hardt fibrinøst belegg

Dokumentert: Monofilamente polyesterfibre løsner og fjerner debridement og eksudat fra såret.

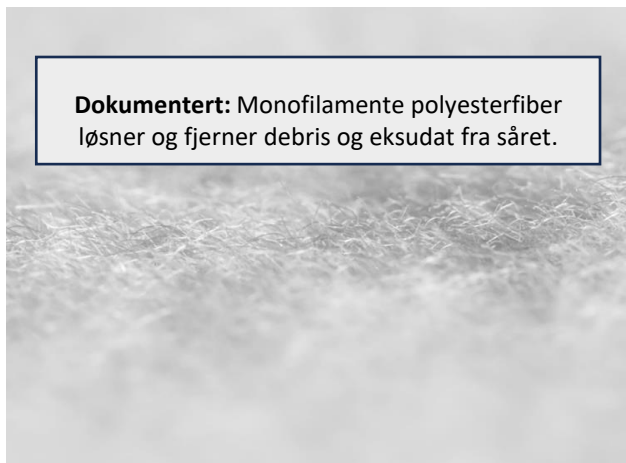

Debrisoft® Duo for myk + grov mekanisk debridering

- Tynnere stoff på Duo-siden bidrar til enkel og effektiv **punktdebridering**
- **Sikkerhet.** Produktet **må snus** for å kunne benytte de grovere fibre = ingen risiko for å skade sensitiv hud
- **Originallets** velkjente og myke fibre er fortsatt tilstede for enkel, effektiv og smertefri opprensing av såret



Bruksanvisning

- Fukt den hvite siden av debrideringspaden med vanlig springvann, sterilt saltvann eller annen sårskyllevæske (ca 20-40 ml) iht prosedyre. Rist bort overskuddsvæske. Væsken vil trenge igjennom og gi fukt til den beige Duo-siden
- Vurder såret og start debridering med enten den beige siden eller den myke hvite siden
- Sidene kan byttes på under debrideringen
- Tips: Begynn med den beige siden, legg et lett trykk på hardsittende belegg og debrider såret. Fortsett deretter med den myke hvite siden i ytterligere 1-3 minutter avhengig av sårets tilstand
- Ved behov kan en ny forfuktet debrideringspad brukes for å rengjøre huden rundt såret
- Etter debrideringen kan såret behandles etter gjeldende prosedyre

Produktmateriale

- Den myke siden består av monofilamente polyesterfiber
- Den grovere Duo-siden består av polyester-polyamidløkker
- Innsiden av produktet består av polyakrylat
- Lateksfri
- Produktet er pakket separat og er EO-sterilisert

Debrisoft® Duo

- CE- merket
- Oppbevares tørt og rent i romtemperatur
- Holdbar i 5 år fra produksjonsdato.
- Produktembalasje av cellulose, polyester, polyakrylat, polypropylen og polyamid
- Lageremballasje og bruksanvisning av cellulose som kan kildesorteres
- Transportemballasje i wellpapp/bølgepapp av cellulose. Kan kildesorteres
- Produktet behandles som brennbart avfall

Debrisoft® Duo finnes i to størrelser:

Størrelser	REF	Avd frp	Trp frp
10x10 cm	159990	5	50
13x20 cm	159991	5	50

