

## Superabsorberende sårbandasje!

Effektiv eksudathåndtering med høy grad av komfort og fleksibilitet.

**Vliwasorb® Pro** er en superabsorberende bandasje for sår med moderat til svært høy mengde eksudat. Den superabsorberende kjernen, danner en en gel når såreksudatet er absorbert og holder på overskuddsvæsken i bandasjen. Vliwasorb® Pro beskytter såret og sårmiljøet mot maserasjon (oppbløtning) og den fremmer sårhelingen.



## Mange fordeler!

Høy absorpsjonskapasitet og høy kapasitet til å holde på væske, inkludert bakterier.  
Reduserer mengden proteaser i såret (MMP).  
Reduserer risikoen for infeksjon.  
Reduserer luktutvikling under behandlingen.  
Beskytter mot oppbløtning av huden.  
Ergonomisk form for enkel tilpassing.  
Danner en gel i kontakt med sårveske.  
Det blå beskyttelseslaget beskytter klær og sengetøy. Sperresjikt på alle fire sidene.  
Bandasjen kan brukes under kompresjon.

### Effektiv eksudathandtering



- Høy absorpsjonskapasitet.
- Høy kapasitet til å holde på eksudatet, inkludert bakterier inne i bandasjen.
- Sjeldnere sårskift.
- Såret får ro.

### Enkel å bruke




- Lett å applisere.
- Fleksibel.
- Kan legges direkte på såret eller som sekundærbandasje over annen bandasje, eks sårfillere.
- Kan brukes under kompresjon.

### Pasientvennlig



- Myk og behagelig.
- Reduserer lukt.
- Fester seg ikke i såret.
- Forebygger oppbløtning av huden rundt såret.
- Beskytter klær og sengetøy.
- Trygg.

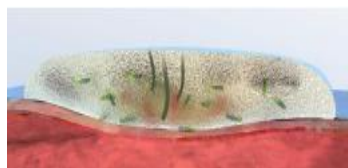

### Indikasjoner

Akutte og kroniske sår med moderat til sterkt væskende sår.

- Trykksår, leggsår, diabetiske fotsår
- Kreftsår, tumorer
- Brannså
- Postoperative sår
- Donorflater
- o.l.

### Skiftefrekvens

Skiftefrekvensen er avhengig av sekresjonsmengde, infeksjonsgrad og evt primær bandasje. Bandasjen kan ligge på i inntil 7 dager.



### Bruksanvisning

1. Såret renses i henhold til prosedyre. Huden rundt såret skal være tørr og ren. Åpne den sterile emballasjen og ta ut bandasjen.
2. Tilpass bandasjen etter sårets størrelse, bandasjen skal gå minst 3 cm utenfor sårkantene. Anvend passende sårfiller (eksempel fiber- eller alginat bandasje) ved dypere sår. Bandasjen skal ikke klippes.
3. Appliser bandasjen, den blå siden skal vende opp og den hvite ned mot såret. Fikser med passende fikseringsprodukt.
4. Sårskift avhenger av sekresjonsmengde og tilstand på såret. Bandasjen kan ligge på i inntil 7 dager.

### Forsiktighetsregler

- Skal ikke brukes inn i sårlommer da den kan ekspandere betydelig ved absorpsjon av sårveske.
- Bør ikke brukes til pasienter med kjent allergi mot produktets bestanddeler.
- Produktet skal ikke klippes.

### Vliwasorb® Pro

Størrelse	Sårputen	Lev.art.nr.	Avd.fp	Trp.fp
10 x 10 cm	6x6 cm	32 640	10	300
12,5 x 12,5 cm	8,5x8,5 cm	32641	10	300
12,5 x 22,5 cm	8,5 x 18,5 cm	32642	10	350
22 x 22 cm	18 x 18 cm	32643	10	260
22 x 32 cm	18 x 28 cm	32644	10	90

### Produktmateriale

- Sårkontaktlag av polyetylen film.
- Fordelende lag av polypropylenfiber.
- Absorberende kjerne av cellulose med superabsorbenter (sodium polyacrylate).
- Beskyttende blått lag av polypropylenfiber.
- Lateksfri.
- Produktet er pakket individuelt og er EO-sterilisert.

### Vliwasorb® Pro

- Er CE-merket, MDR klasse IIb,4.
- Oppbevares tørt og rent i romtemperatur.
- Holdbar i 5 år fra produksjonsdato.
- Produktemballasje av cellulose og polyethylene.
- Lageremballasje og bruksanvisning av cellulose som kan kildesorteres.
- Transportemballasje i wellpapp/bølgepapp av cellulose. Kan kildesorteres.
- Produktet behandles som brennbart avfall.