


Debriderer såret i dybden.

For sårflater som er vanskelig å komme til.

Med sin innovative og unike konstruksjon gir **Debrisoft® Lolly** deg en mulighet til å rense opp i dypere kaviteter og sårlommer.



fibre technology
ACTITOP

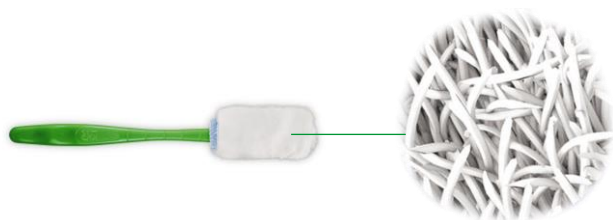

Den eneste på markedet!

Hodet på **Debrisoft® Lolly** består av monofilamente polyesterfibrer med en unik Actitop-teknologi. Hodet er fastsydd med doble sømmer på et gripevennlig skaft av polypropylen og har en kantsøm med blå røntgensynlig tråd.

Raskt resultat



- Sparer tid og derfor penger
- Gjør såret rent på **2-4** minutter
- Effektiv mot biofilm

Enkel å bruke



- Lolly er praktisk og brukervennlig.
- 95% vurderer den som veldig bra eller utmerket!

Nesten smertefritt




- Bedre etterlevelse
- Lite smerter




Indikasjoner (A)

- Trykksår
 - Kirurgiske sår
 - Sår som er vanskelig å komme til.
- Kan brukes til både dype og overfladiske sår.

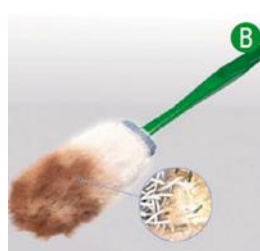

Funksjon (B)

De patenterte fibertrådene binder til seg fibrin, eksudat og bakterier slik at det blir en skånsom og effektiv opprensing av såret.

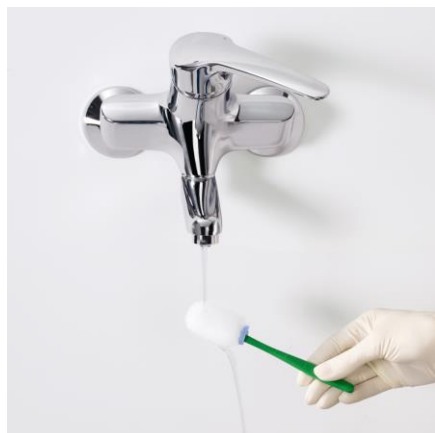

Bruksanvisning:

- Fukt fiberhodet med vanlig springvann eller NaCl 0,9 % i samsvar med gjeldene lokale retningslinjer, ca 5-15 ml.
- Gjør sår og sårlommer rene med et lett trykk på det forfuktede fiberhodet.
- Ved behov kan en debrideringspad brukes for å rengjøre huden rundt såret.
- Etter debrideringen kan såret behandles etter gjeldende prosedyre.

Forsiktighetsregler:

- La ikke **Debrisoft® Lolly** bli liggende igjen i såret.
- Den skal ikke føres inn i sår som har en åpning som er mindre enn fiberhodet.
- Fiberhodet på Debrisoft Lolly må ikke klippes til eller løsnes fra skaftet.
- Unngå kraftig trykk da det kan føre til smerter og/eller skade på vevet.
- Vær ekstra oppmerksom når produktet brukes ved fistler som har uklare forbindelser (f.eks. abdomen).



Debrisoft® Lolly finnes i en størrelse:

Lev.art.nr	Størrelse	Avd.fp	Trp.fp
33 224	5 cm (hoveddel) 15,5 cm inkl. skaft	5	50



Produktmateriale

- Hoveddelen er laget av monofilamente polyesterfibrer, innsiden av polyakrylat samt røntgentråd av polypropylen
- Skaftet er laget av polypropylen
- Produktet er pakket separat og er EO-sterilisert.

Debrisoft® Lolly

- CE-merket
- Oppbevares tørt og rent i romtemperatur.
- Holdbar i 3 år fra produksjonsdato.
- Produktemballasje av cellulose, polyester og polypropylen.
- Lageremballasje og bruksanvisning av cellulose som kan kildesorteres.
- Transportemballasje i wellpapp/bølgepapp av cellulose. Kan kildesorteres.
- Produktet behandles som brennbart avfall.